

HÖCHSTE DESINFEKTIONS- SICHERHEIT FÜR OBERFLÄCHEN

Incidin® perfekt

Flächendesinfektionsmittel mit einer Wirkstoffkomposition aus Aldehyden

Breites Wirkspektrum gegen Bakterien (inkl. MRSA, TB) und Hefen. Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) und viruzid.

Hohe Desinfektionssicherheit auf allen abwaschbaren Flächen, besonders geeignet in Risikobereichen.

- ▶ Zuverlässige Desinfektion
- ▶ Sichere Anwendung
- ▶ Einsetzbar in Risikobereichen



**RKI-GELISTET
(A/B)**



Incidin® perfekt

Flächendesinfektionsmittel mit einer Wirkstoffkomposition aus Aldehyden

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Zuverlässige Desinfektion	RKI-gelistet zur Flächen- und Wäsche-desinfektion, einsetzbar bei meldepflichtigen, übertragbaren Krankheiten
Sichere Anwendung	Bewährte viruzide Desinfektion
Einsetzbar in Risikobereichen	Kein Produktwechsel notwendig im Seuchenfall
Materialverträglichkeit umfangreich geprüft	Einsetzbar bei: Metallen (z.B. Messing), Kunststoffen (z.B. Polycarbonat), Elastomeren (z.B. EPDM), Fußböden (z.B. Linoleum)

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION %	ml/L	EINWIRKZEIT Min.
VAH-Liste (bakterizid, levurozid)			
Flächendesinfektion gemäß DGHM 2001, mit Mechanik und geringer Belastung	0,25/0,5/0,75	2,5/5/7,5	240/30/15
Flächendesinfektion gemäß DGHM 2001, mit Mechanik und hoher Belastung	0,5/0,75/1	5/7,5/10	240/30/15
IHO-Viruzidie-Liste			
Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie 2008 (hohe Belastung)			
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004	0,25/0,5	2,5/5	5/1
Viruzid	1/2	10/20	120/30
Adenovirus	0,25	2,5	5
Papovavirus / Polyomavirus / SV40	0,5	5	5
Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung)			
Tuberkulozid, mit Mechanik	2	20	30
RKI-Liste			
Gem. § 18 IfSG (Desinfektion im Seuchenfall)			
Scheuerdesinfektion Wirkungsbereich A/B	3	30	240
Chemische Wäschedesinfektion Wirkungsbereich A/B	1	10	720

EFFEKTIV.
PERFEKT.
ZUVERLÄSSIG.



Oberflächendesinfektion
für Medizinprodukte



Flüssiges Desinfektionsmittel-
konzentrat zur Desinfektion
von Flächen aller Art.
D BIOZID N-12506

ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchslösung durch Verdünnen mit Wasser (max. 30 °C) in der gewünschten Konzentration ansetzen.

Zu behandelnde Fläche feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten.

Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Amin- bzw. aminderivat-haltige Desinfektionsmittel und aldehyd-haltige Desinfektionsmittel sind nicht im Wechsel anwendbar. Bei Umstellung ist eine gründliche Zwischenreinigung notwendig.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten: 12 g Glyoxal, 11,1 g Formaldehyd, 3,75 g Glutaral, 2,7 g Benzalkoniumchlorid, 1 g Polyhexamethylenbiguanid

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft – mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungs- einheit	Artikel- nummer
Incidin® perfekt Nachfüllflasche	3 x 2 L	30 112 90 PZN 073 281 98
Incidin® perfekt Kanister	6 L	30 113 00 PZN 069 525 98

BIOZIDE SICHER VERWENDEN.
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG
UND PRODUKTINFORMATION LESEN.

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44-877-2000
www.ecolab.eu



REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de

