

MEtherm® 56 – Neutralisator P (auf Phosphorsäurebasis)



Hersteller

MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Geneststraße 6 - 10
D-10829 Berlin

1. Produktvorteile auf einen Blick

- Zur Optimierung des Aufbereitungsergebnisses im MELAtherm 10
- Vorbeugung von Ablagerungen auf Instrumenten und im MELAtherm 10
- Breites Anwendungsspektrum
- Zur Neutralisation und Grundreinigung geeignet

2. Produktbeschreibung

MEtherm 56 wird für die Neutralisation nach alkalischer Reinigung mit MEtherm 50 und zur Optimierung des Aufbereitungsergebnisses im MELAtherm 10 verwendet.

MEtherm 56 löst zuverlässig säurelösliche Ablagerungen wie Kalk und beugt effektiv Ablagerungen an chirurgischen Instrumenten und im MELAtherm 10 vor.

MEtherm 56 wird zur Aufbereitung von ophthalmologischen Instrumenten nicht empfohlen.

Die aufzubereitenden Instrumente und Utensilien sollten vor dem Einsatz von MEtherm 56 auf Säurebeständigkeit geprüft werden.

3. Anwendungshinweis

Anwendungskonzentration:

Die Anwendungskonzentration nach alkalischer Reinigung mit MEtherm 50 im MELAtherm 10 beträgt 1-2 ml/l (0,1-0,2 %). Die Dosierung ist werkseitig voreingestellt und erfolgt dann vollautomatisch über das integrierte Dosiermodul des MELAtherm 10.

Anwendungshinweise:

Bei einem erforderlichen Austausch des Kanisters erfolgt eine entsprechende Mitteilung auf dem Display des MELAtherm 10. MEtherm 56 nicht mit anderen Prozessmedien mischen.

MEtherm 56 ist nicht für Buntmetalle, verchromte Teile und eloxiertes Aluminium einzusetzen.

Eine Grundreinigung mit MEtherm 56 kann für 10 Minuten bei 60 °C und 40 ml (4 %) im Ultraschallbad erfolgen. Bitte beachten Sie die Angaben des Instrumentenherstellers.

4. Technische Daten

Zusammensetzung:

enthält Orthophosphorsäure

Dichte: ca. 1,43 g/cm³ / 20 °C

Farbe: farblos

Form: flüssig

Flammpunkt: nicht anwendbar

pH: ca. 1,2 / 20 °C / Konzentrat

Viskosität, dynamisch: keine Daten vorhanden

5. Sonstige Angaben

Behälter dicht geschlossen halten. Im Originalgebinde lagern. Vor Frost, Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

6. Bestellinformation

Artikel:		Art.-Nr.:
MEtherm 56 - Neutralisator P	Kanister 5 l	11622
Kanisterschlüssel für 5 l und 10 l		11906

7. Verwandte Produkte

- MEtherm 50 - mildalkalischer, enzymatischer Reiniger
 - MEtherm 55 - Neutralisator C (auf Zitronensäurebasis)
 - MEtherm 60 - Klarspüler
 - MEtherm 61 - Klarspüler
-